

## VENNER PNEUX™ SYSTEM LIMPIADORES Y DESINFECTANTES RECOMENDADOS

### VENNER PNEUX TSM™

#### 1. LIMPIADORES

Las soluciones de limpieza enumeradas a continuación están aprobadas para su uso con Venner PneuX TSM™. PneuX Life Systems Inc ha obtenido la información de las Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS), Hojas de datos de resistencia química, sitios web de fabricantes y de terceros. Siga el uso de estas soluciones de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

PneuX Life Systems Inc no se hace responsable de ningún daño al Venner PneuX TSM™ que resulte de cualquier variación en la composición química de los productos de limpieza.

Nombre del Limpiador	Fabricante	Nombre del Limpiador	Fabricante
ASEPTI-WIPE II	Ecolab	DISINFECTING	CLOROX
BIGUACID PLUS	Antiseptica	HOSPEC pH NEUTRAL DETERGENT	Hospec

#### 2. DESINFECTANTES

##### ■ Compatibilidad con Isopropyl Alcohol (IPA)

El IPA se usa comúnmente como desinfectante y, por naturaleza, tiene una tasa de evaporación rápida y una formulación de bajo residuo. El uso de IPA no debería causar ningún defecto funcional al Venner PneuX TSM™.

Los siguientes desinfectantes tienen un contenido de IPA relativamente alto. Se recomienda realizar las pruebas adecuadas debido a niveles sustanciales o desconocidos de IPA. Siga el uso de estos desinfectantes de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Nombre del Desinfectante	Fabricante
ALCOPAD	CleanTex
GIGASEPT INSTRU AF	Schülke & Mayr GmbH
SUPER SANI-CLOTH	PDI

##### ■ Compatibilidad con Soluciones de Chlorhexidina

La clorhexidina es un desinfectante y antiséptico que se utiliza para la desinfección de la piel antes de la cirugía y para esterilizar instrumentos quirúrgicos. Los siguientes desinfectantes son marcas comerciales de clorhexidina. Se recomienda realizar las pruebas adecuadas antes de usar con el monitor de sellado traqueal Venner™. Siga el uso de estos desinfectantes de acuerdo con las instrucciones del fabricante..

Fabricante	Fabricante	Fabricante
Avagard	Corsodyl	Peridex
Betasept	Dyna-Hex	PerioGard
BactoShield CHG	Hibiclens	PerioChip
Chlorostat	Hibistat	Riohex
ChloraPrep	Operand Chlorhexidine Gluconate	XEPI Rub CET

## VENNER PNEUX™ SYSTEM LIMPIADORES Y DESINFECTANTES RECOMENDADOS

### VENNER PNEUX™ ETT, TT y Tubo de Extensión

El Venner PneuX™ ETT, TT y el tubo de extensión son dispositivos de un solo uso que deben desecharse después de cada uso, de acuerdo con las prácticas departamentales estándar. Cualquier intento de reutilizar estos dispositivos presenta un riesgo grave de infección cruzada, reduce la confiabilidad y funcionalidad del producto.

**Notas:**

Venner PneuX TSM™ se conocía antes como Venner™ Tracheal Seal Monitor

Venner™ PneuX™ ETT and TT se conocían antes como Venner™ PneuX™ P.Y.™ Endotracheal Tube and Tracheostomy Tube